

Apêndice 6

Teste de formol-gel

Adicione duas gotas de solução concentrada de formalina (40 % p/v) a aproximadamente 1 ml de soro. No teste positivo, o soro fica branco e se solidifica, formando um gel. No teste negativo, o soro não sofre qualquer mudança e a gelificação só ocorre após algum tempo (30 minutos). A solidificação do soro, sem esbranquecimento, é considerada um resultado negativo para a LV.

O teste de formol-gel também pode ser efetuado com quantidades muito pequenas de soro, numa lâmina de vidro. Misture uma gota de soro e uma pequena gota de solução concentrada de formalina e verifique se ocorre esbranquecimento e solidificação do soro em gel.