

APENDICE 6

Prueba de formolgelificación

Añadir dos gotas de solución de formalina concentrada (40% p/v) a 1 ml aproximadamente de suero. En una prueba positiva, el suero se vuelve blanco y se solidifica formando un gel. En una prueba de resultado negativo, el suero no cambia o se vuelve blanco y sólo se gelifica con retraso (30 minutos). La solidificación del suero sin blanqueo se considera como un resultado negativo para la LV.

La prueba de formolgelificación también puede realizarse con cantidades pequeñas de suero sobre un portaobjetos. Mezclar una gota de suero y una pequeña gota de solución de formalina concentrada y examinar para determinar si el suero se blanquea y se solidifica formando un gel.